


fasciotens®Abdomen

# Quick Guide




**Tipp:**  
Bringen Sie den Quick Guide in der Nähe des Patienten zur Information des Behandlungsteams an.

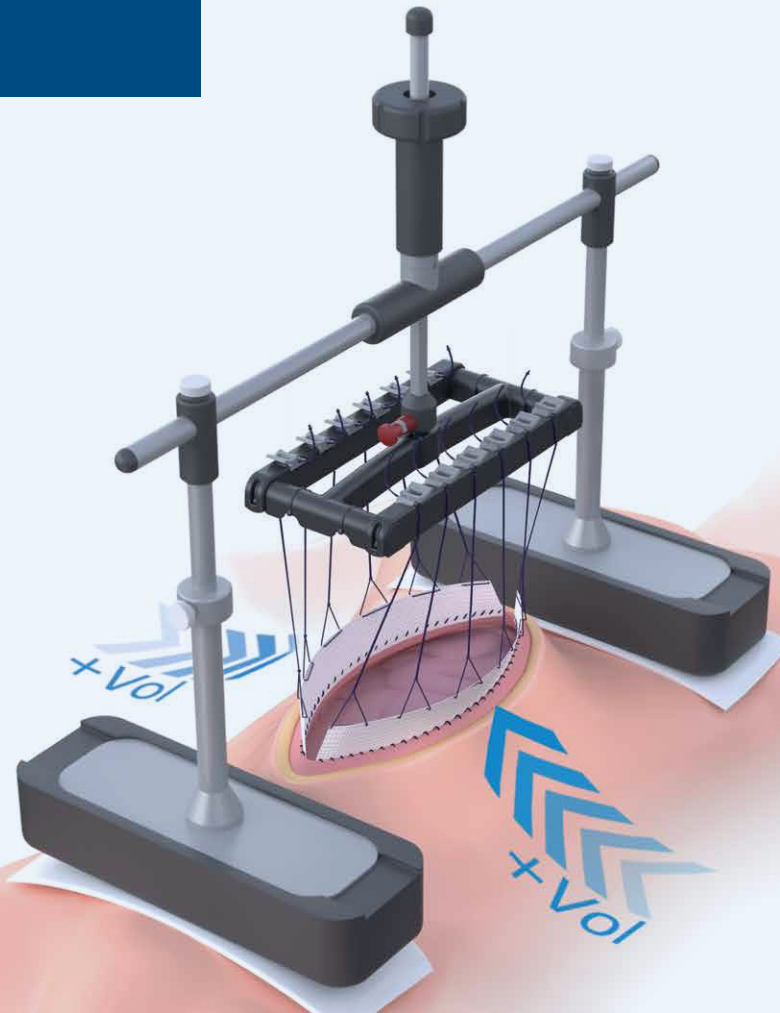



**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

## Produktaufbau


⚠ Zu Beginn jeder Neuinstallation das schwarze Handrad nach oben drehen bis es bündig mit der Endkappe abschließt.

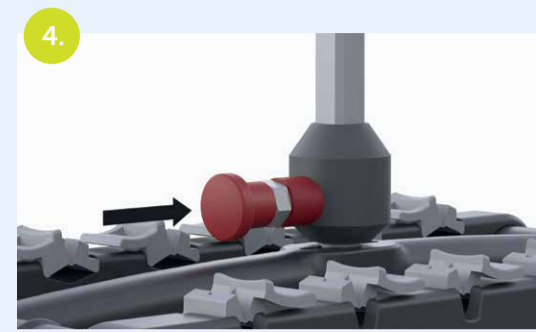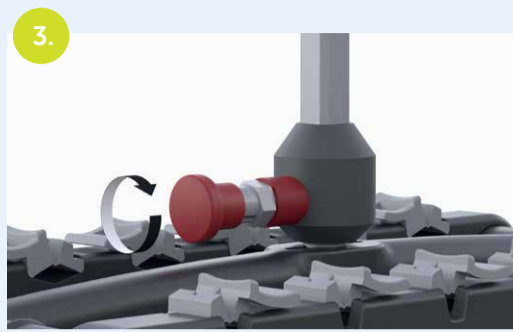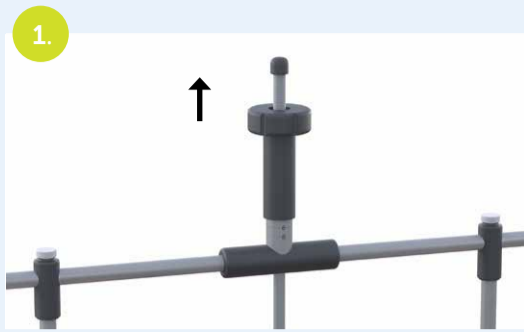

## Höhen- und Längenverstellung (optional)

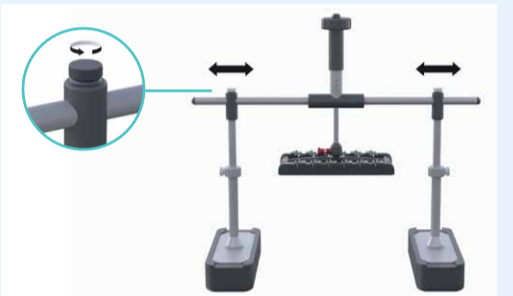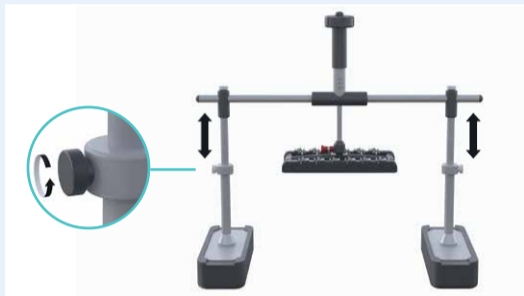

## Zugkraftregulierung


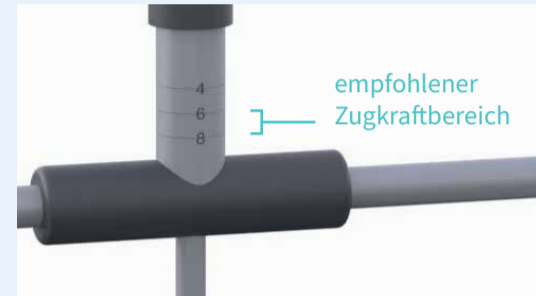


⚠ Drehen Sie das schwarze Handrad zur Regulierung der Zugkraft.





⚠ Führen Sie regelmäßige Kontrollen der Zugkraft durch und regulieren Sie diese bei Bedarf in den zuvor definierten Bereich.

## Einspannen der Fäden

⚠ Alle Fäden sind auf Grundspannung zu kontrollieren. Ggf. müssen Fäden nachgespannt werden.

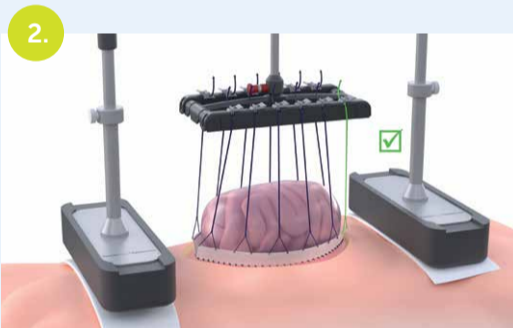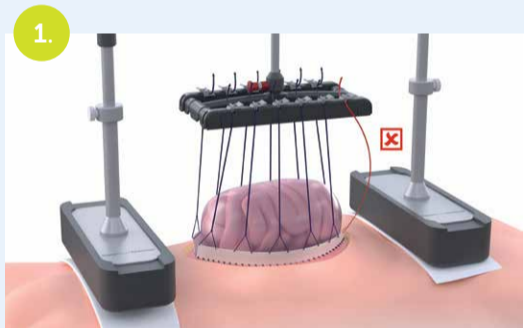

## Demontage in der täglichen Pflege (und im Notfall)

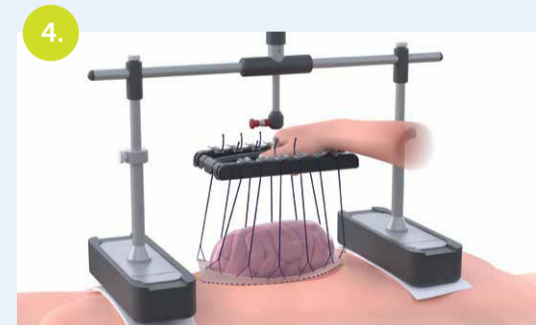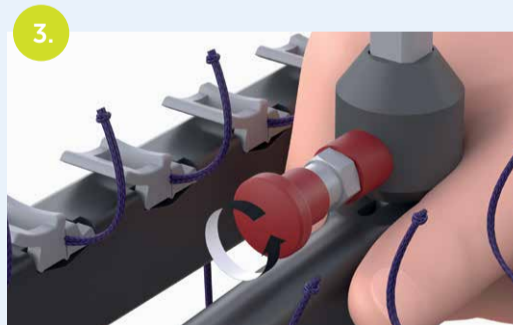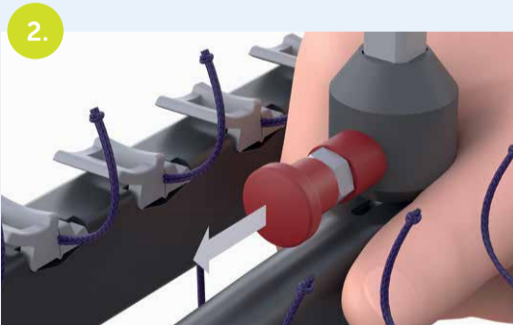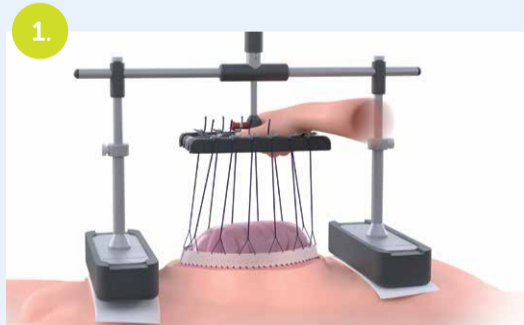

1. Fixieren Sie die Fadenhalterung mit einer Hand.

2. Ziehen Sie den roten Rastbolzen heraus.

3. Drehen Sie ihn um 90°.

4. Die Fadenhalterung löst sich und lässt sich nach unten hin entfernen.

## ⚠ Weitere Sicherheitshinweise

Die Auflageflächen dürfen nur auf intakter Haut aufgebracht werden.


Es ist darauf zu achten, dass unter den Auflageflächen keine Fremdkörper eingeklemmt werden wie z. B. Kabel, Elektroden, Zu- oder Ableitungen.

Unterpolstern Sie immer die Auflageflächen mit großen faltenfreien Saugkompressen oder ähnlichen faltenfreien Materialien.

Das Produkt darf nicht auf dem Genital platziert werden.

Zur Vermeidung von Hautirritationen werden Traktionsintervalle von circa 5 Stunden gefolgt von einer Stunde Traktionspause empfohlen.

Videoanleitung

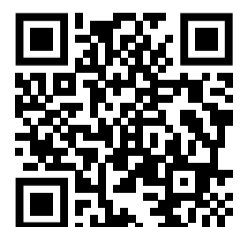

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

# fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



**fasciotens GmbH**

Moltkeplatz 1  
45138 Essen

**[www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)**

[info@fasciotens.de](mailto:info@fasciotens.de)  
Tel. +49 221 17738500

**Support:**

[support@fasciotens.de](mailto:support@fasciotens.de)  
Tel.: +49 221 17738500

**fasciotens GmbH**

Aachener Str. 1053-1055  
50858 Köln