


fasciotens®Hernia


elevated by fasciotens®Carrier

Quick Guide

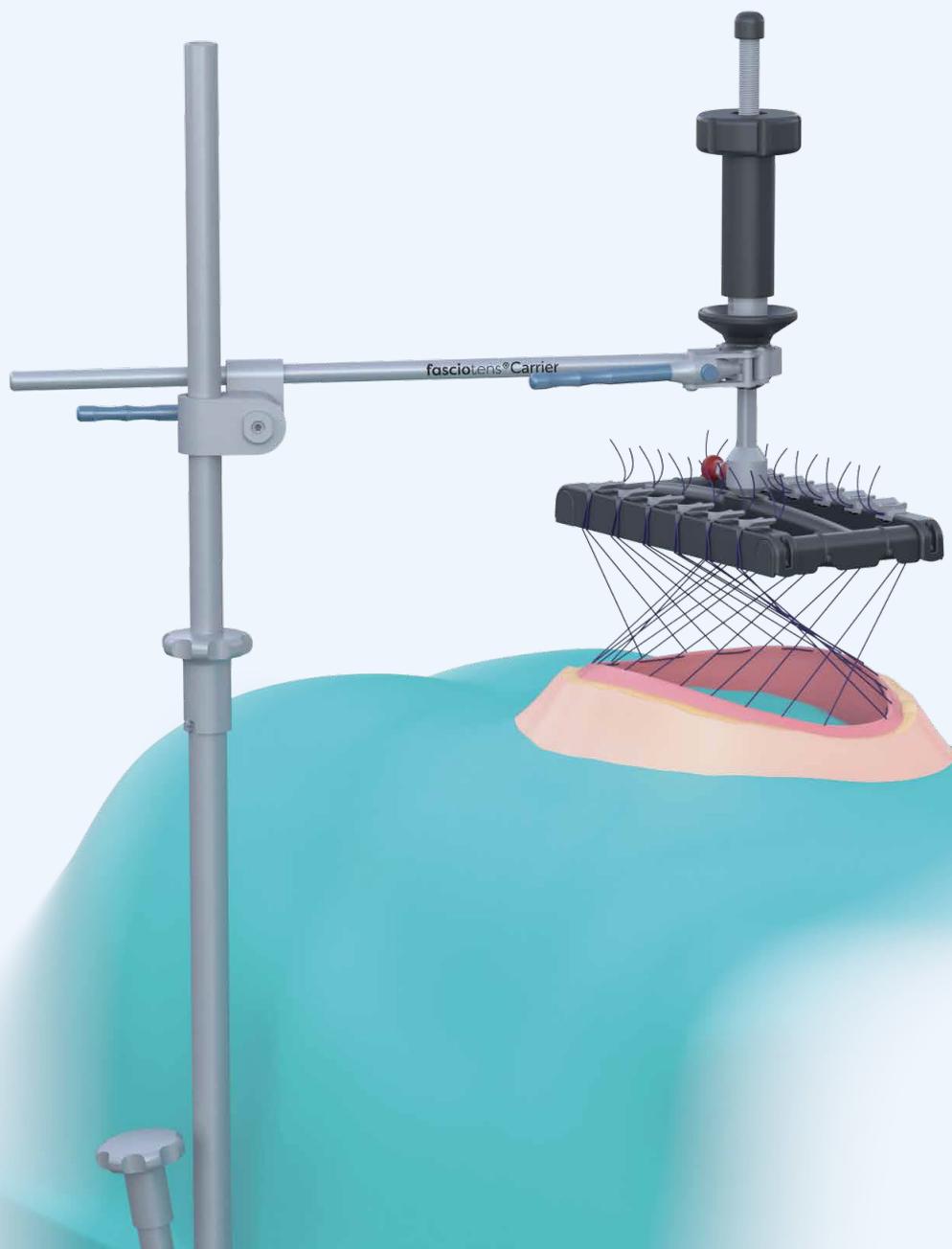


fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS


Vorbereitung des Patienten

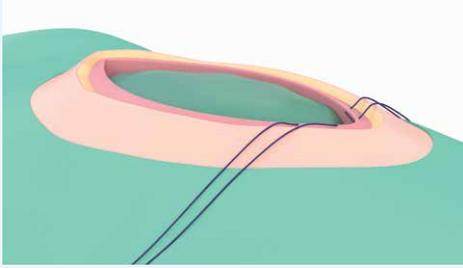

Stechen Sie die Fäden (polyfil USP 2 > 50 cm) als U-Naht (2-3 cm breit) mit einem Abstand von 1 cm zum Faszienrand.


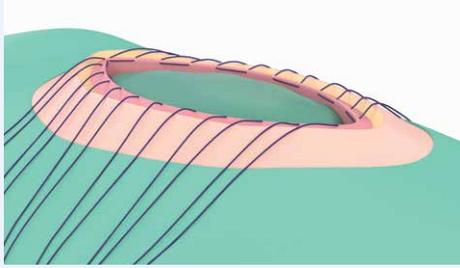


Schützen Sie die Bauchorgane mit feuchten Bauchtüchern während der Zugphase.

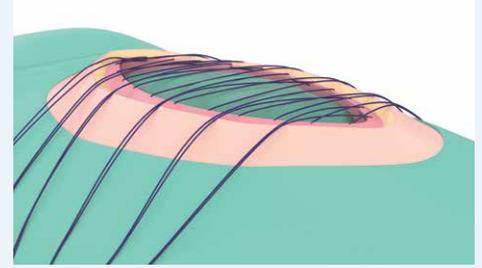


Option: Zur einfacheren Handhabung können Sie die Fäden vor dem Einspannen über Kreuz legen.



Montage fasciotens®Carrier

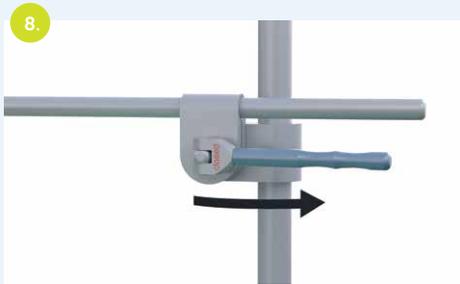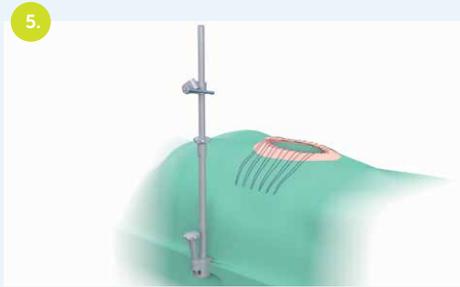



Anbringung von fasciotens®Hernia an den fasciotens®Carrier

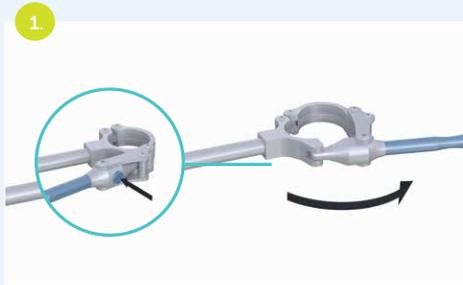

Druckknopf beim Öffnen gedrückt halten.

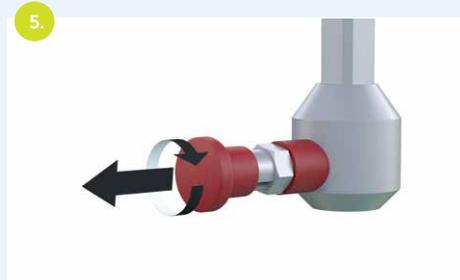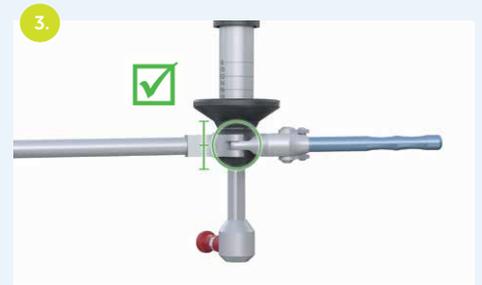

Einspannen der Zugfäden unter Vorspannung

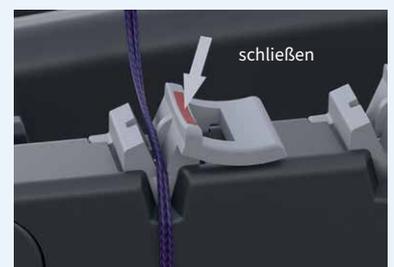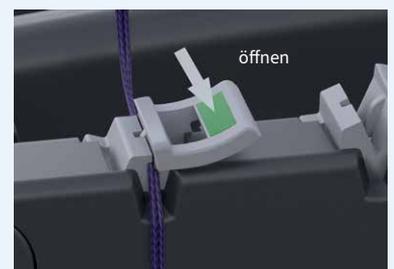

Drücken Sie das Handrad herunter, um eine Vorspannung von 14 kg zu erzeugen. Halten Sie die Spannung bis ALLE Einzelfäden eingespannt sind und lösen sie dann langsam die Vorspannung.

Alle 2 min sollten die Einzelfäden nachgezogen werden. Ist kein Nachspannen der Einzelfäden mehr möglich, kann durch Drehen des Handrades die Zugkraft weiter erhöht werden.

Einspannen der Fäden von außen nach innen

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



fasciotens GmbH
Moltkeplatz 1
45138 Essen

www.fasciotens.de
info@fasciotens.de
Tel. +49 221 17738500

Support:
support@fasciotens.de
Tel.: +49 221 17738500

fasciotens GmbH
Aachener Str. 1053-1055
50858 Köln