


fasciotens® Abdomen

Γρήγορος οδηγός

Συμβουλή:

Τοποθετήστε τον
Γρήγορο Οδηγό
κοντά στον ασθενή
για πληροφόρηση της
ομάδας θεραπείας.

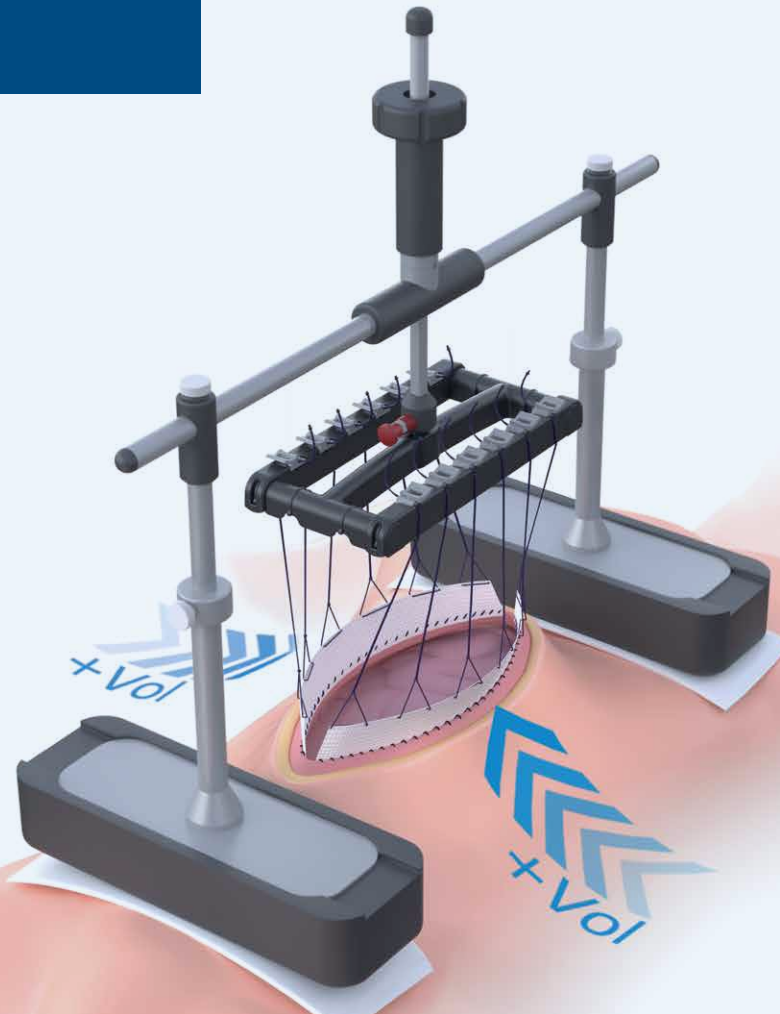

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Δομή προϊόντος

▲ Στην αρχή κάθε νέας εγκατάστασης, περιστρέψτε τον μαύρο χειροτροχό προς τα πάνω μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το τερματικό πώμα.



Ρύθμιση του ύψους και του μήκους (προαιρετικό)



Ρύθμιση ελκτικής δύναμης




- ▲ Περιστρέψτε τον μαύρο χειροτροχό για να ρυθμίσετε την ελκτική δύναμη.
- ▲ Πραγματοποιείτε τακτικούς ελέγχους της ελκτικής δύναμης και, εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίζετε την εντός του προκαθορισμένου εύρους.

Σφίξιμο των ραμμάτων

▲ Όλα τα ράμματα πρέπει να ελέγχονται για την κύρια τάση. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να σφίξετε τα ράμματα.



Αποσυναρμολόγηση κατά την καθημερινή φροντίδα (και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

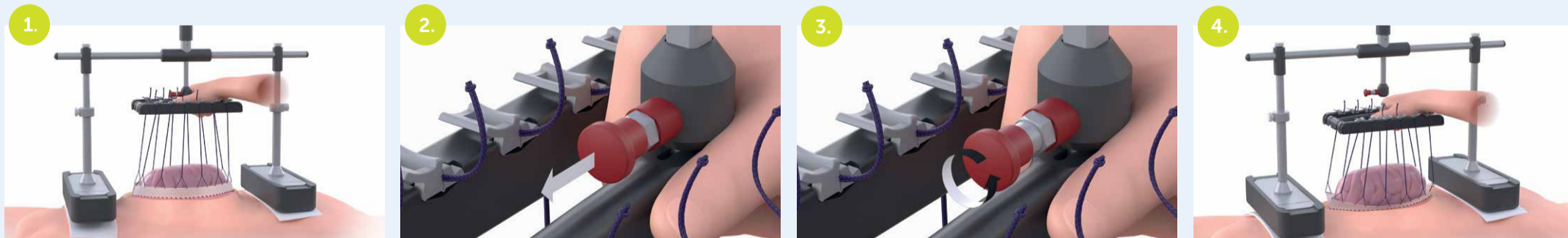

1. Στερεώστε τη βάση στήριξης των ραμμάτων με το χέρι.

2. Τραβήξτε προς τα έξω τον κόκκινο πείρο ασφάλισης.

3. Περιστρέψτε τον κατά 90°.

4. Η βάση στήριξης των ραμμάτων χαλαρώνει και μπορείτε να την αφαιρέσετε τραβώντας προς τα κάτω.

▲ Περισσότερες υποδείξεις ασφαλείας

Οι επιφάνειες στήριξης μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε άθικτο δέρμα.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα παγιδευτούν ξένα σώματα κάτω από τις επιφάνειες στήριξης, όπως π.χ. καλώδια, ηλεκτρόδια, γραμμές παροχής και παροχέτευσης.

Πάντα γεμίζετε τις επιφάνειες στήριξης με μεγάλες απορροφητικές κομπρέσες χωρίς πτυχώσεις ή παρόμοια υλικά χωρίς πτυχώσεις.

Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στα γεννητικά όργανα.

Για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος, συνιστώνται διαστήματα έλξης περίπου 5 ωρών που ακολουθούνται από διάλειμμα έλξης διάρκειας 1 ώρας.

Βίντεο με οδηγίες



fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης!

fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



fasciotens GmbH

Moltkeplatz 1

D-45138 Essen | Germany

www.fasciotens.de

info@fasciotens.de

Τηλ. +49 221 17738500

Υποστήριξη:

support@fasciotens.de

Τηλ.: +49 221 17738500

fasciotens GmbH

Aachener Str. 1053-1055

D-50858 Köln | Germany